

ZEKERHEID DOOR NAUWKEURIGHEID

TAT 5000S ARTERIAL THERMOMETER




EXERGEN
CORPORATION

TAT5000S VOLWASSENEN

TIPS & TRICKS

zeer nauwkeurig meten met de TAT-5000S

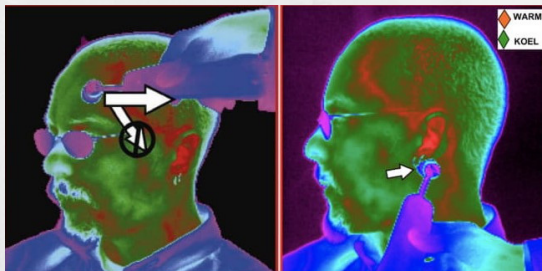

Stap 1 - Scan eerst over het voorhoofd

- Plaats de meet kop voorzichtig tegen het voorhoofd van de patiënt en druk op de scanknop;
- Hou de scanknop ingedrukt en schuif de meet kop over de huid in een rechte lijn dwars over het voorhoofd tot aan de haargrens;
- Blijf de scanknop ingedrukt houden

Stap 2 - Scan nu achter het oor

- Blijf de scanknop ingedrukt houden, neem de meet kop van het voorhoofd en plaats deze achter het oorleltje op de huid

Stap 3 - Lees de temperatuur af

- Laat de scanknop los en lees de temperatuur af;
- De temperatuur blijft 30 seconden lang zichtbaar op het scherm.

Tip 1 - Scan altijd op de blootliggende huid

Tip 2 - Meet NIET langs de zijkant van het gezicht

Tip 3 - Meet op het voorhoofd én achter het oor in één meting

Tip 4 - Meet bij een liggende patiënt altijd de bovenliggende kant van het voorhoofd

Tip 5 - Is het voorhoofd geheel bedekt met verband of is het voorhoofd getraumatiseerd (verbranding, verwonding), kies dan wél voor de positie achter het oor als scanpositie

Tip 6 - Gebruik deze meetmethode ook bij obese patiënten

LET OP!

Meet altijd met een schone lens!

Reinig de lens voor het eerste gebruik met 70% alcohol!